





MODELO: WDTP-10

Manual de Instrucciones



El operador debe leer el manual de operación y familiarizarse con las funciones antes de usar el equipo.


ESTRUCTURA

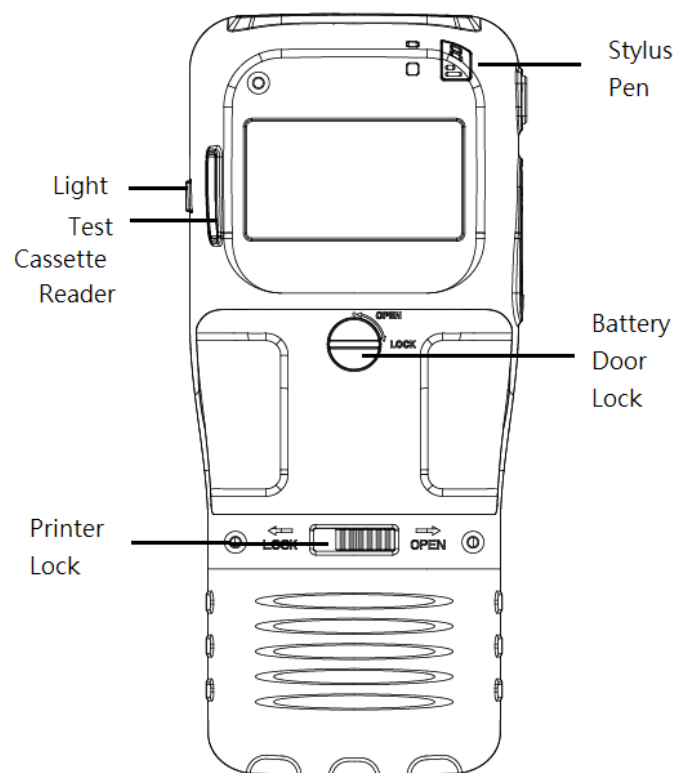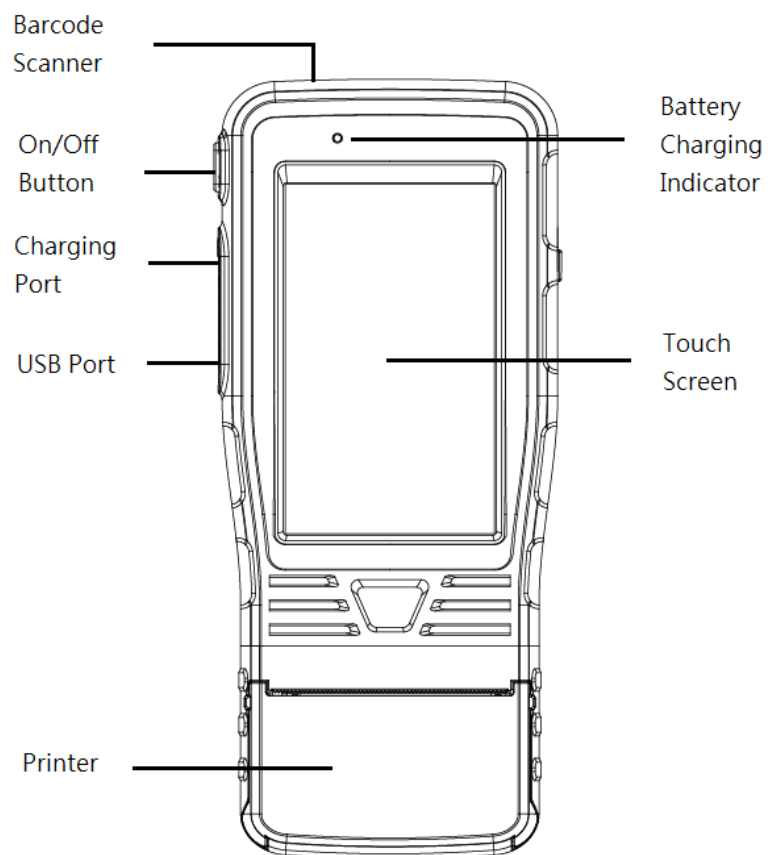

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Prueba

1. Utilice guantes para realizar la prueba.
2. Abra un casete nuevo, retire el cassette de prueba y el colector de muestra.

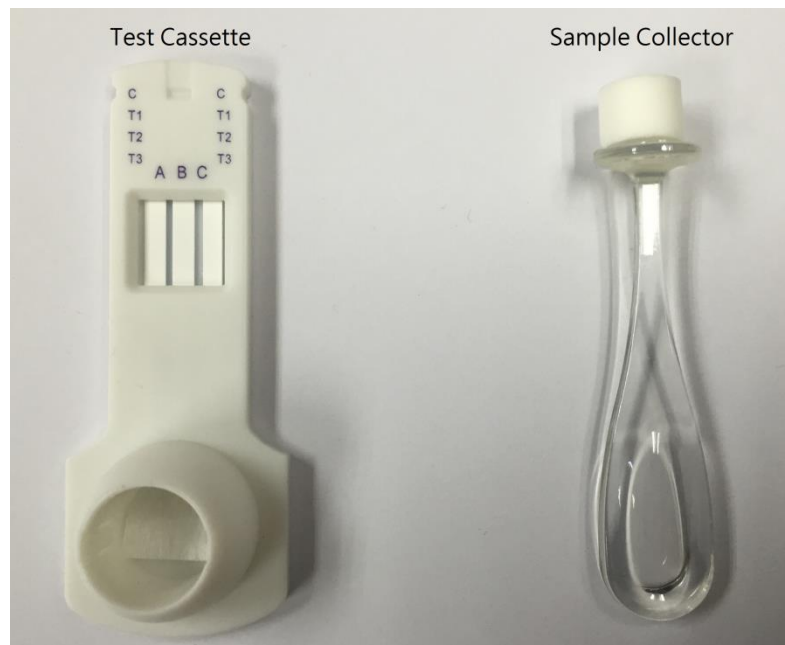

3. Encienda el dispositivo y regístrese utilizando la clave 88888888.
4. Presione el ícono “Test” para iniciar una nueva prueba.



Apr 30, 2018
16:47:43

5. Ingrese la información requerida de la prueba.

6. Ecanee el código de barra del casete de prueba.



7. Se mostrará información del casete de prueba en la pantalla. Confirme que la información en pantalla coincide con la información en el paquete del casete. Presione la flecha para continuar.

Scan Results			
Cassette Type:WELL07M			
Cassette No:NA			
Cassette Expiry Date:03/2020			
1	T1A	THC	40ng/ml
2	T2A	OPI	20ng/ml
3	T3A	AMP	50ng/ml
4	T1B	COC	20ng/ml
5	T2B	MET	50ng/ml
6	T3B	BZO	15ng/ml
7	T2C	MTD	15ng/ml


8. Ponga el recolector de muestra en la boca del donante, asegurese que el donante se frote las mejillas, cavidades y superficie de la lengua, y después ponga la esponja debajo de la lengua. Deje el recolector en la boca por 3 minutos hasta que el indicador de color en el colector se ponga rojo.




9. Inserte el colector de muestra en el casete tal cómo se muestra en la figura a continuación, gire el colector hasta que quede fijo en su lugar.




10. Espere 5 minutos o hasta que se vean las líneas de control. Inserte el caset en el dispositivo y presione la fleche para continuar. **Precuación: Empuje el casete hasta el fin hasta que escuche un click.**

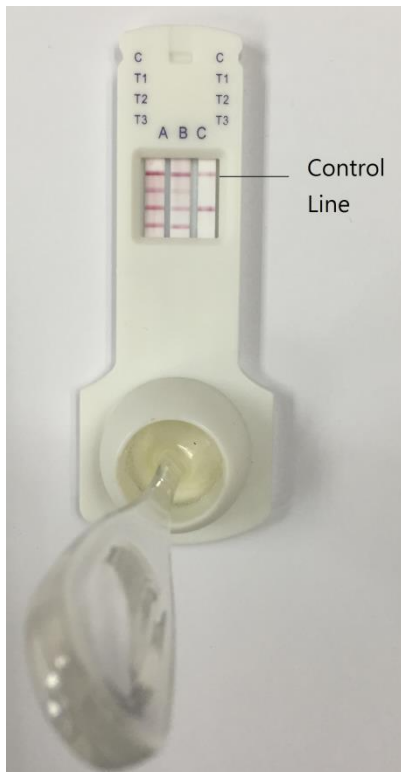


11. Una vez que el casete se haya insertado, el dispositivo leerá los resultados lo que toma entre 10 a 20 segundos.

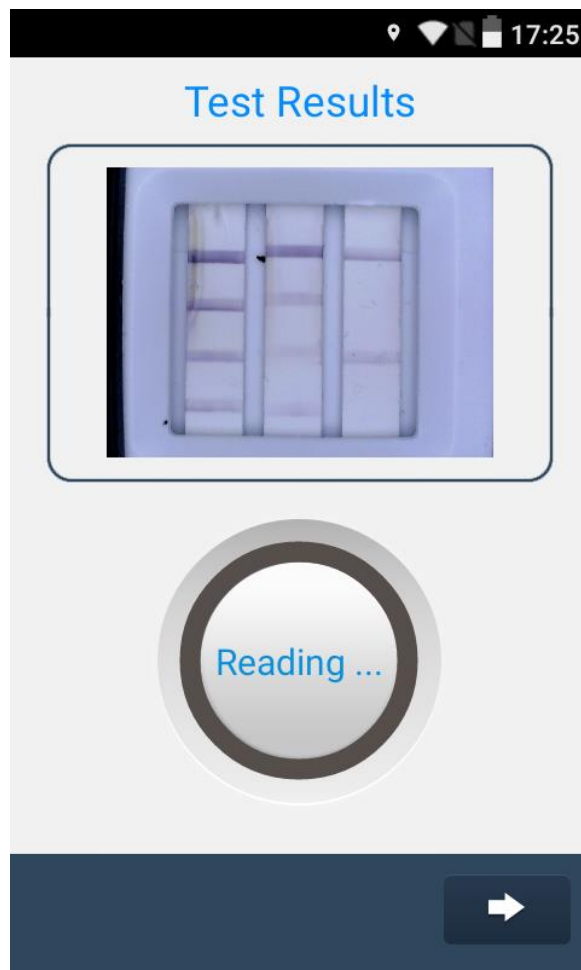


12. Los resultados se mostrarán en la pantalla. Presione la flecha para continuar.

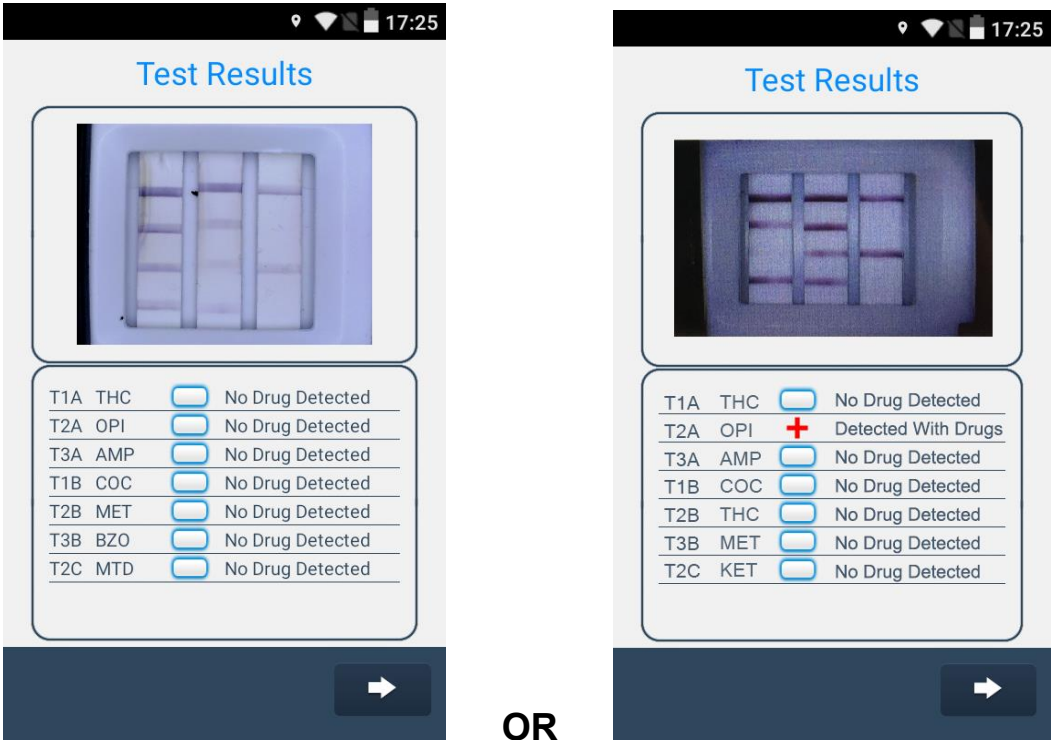

13. Si se detectaron drogas por favor coordine una prueba de laboratorio.
14. Si el casete no funciona correctamente o no aparecen las líneas de control la prueba es invalida. Repita la prueba con un casete nuevo.

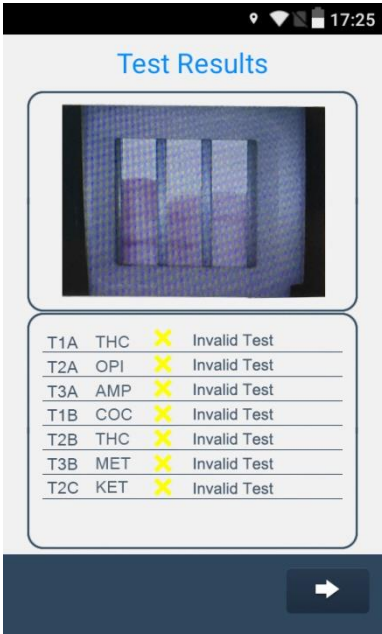


15. Si se necesita, imprima el registro de prueba.

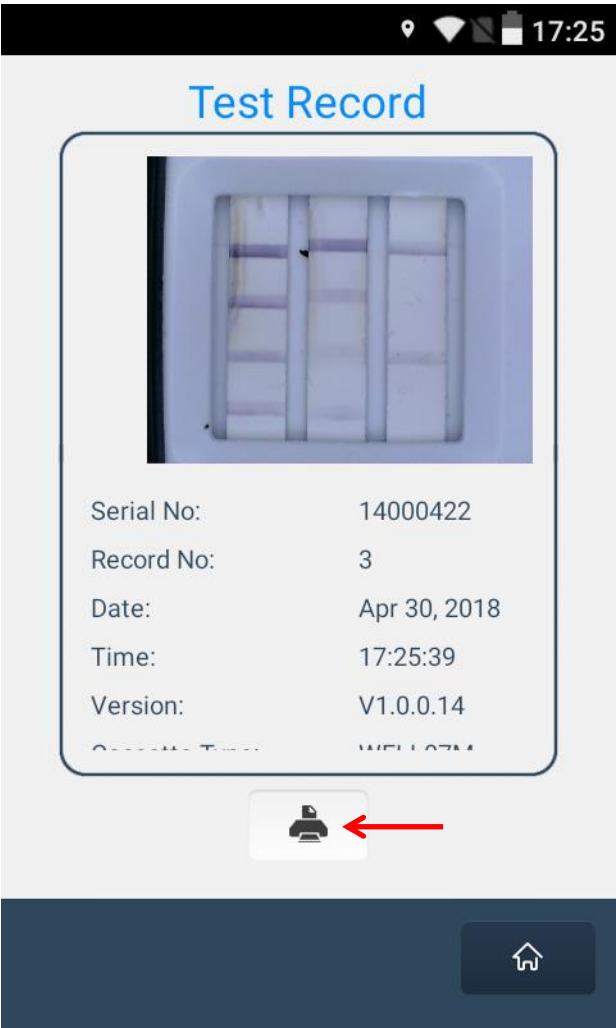

Funciones

1. Presione el icono “Functions” para ingresar a la función de configuración.

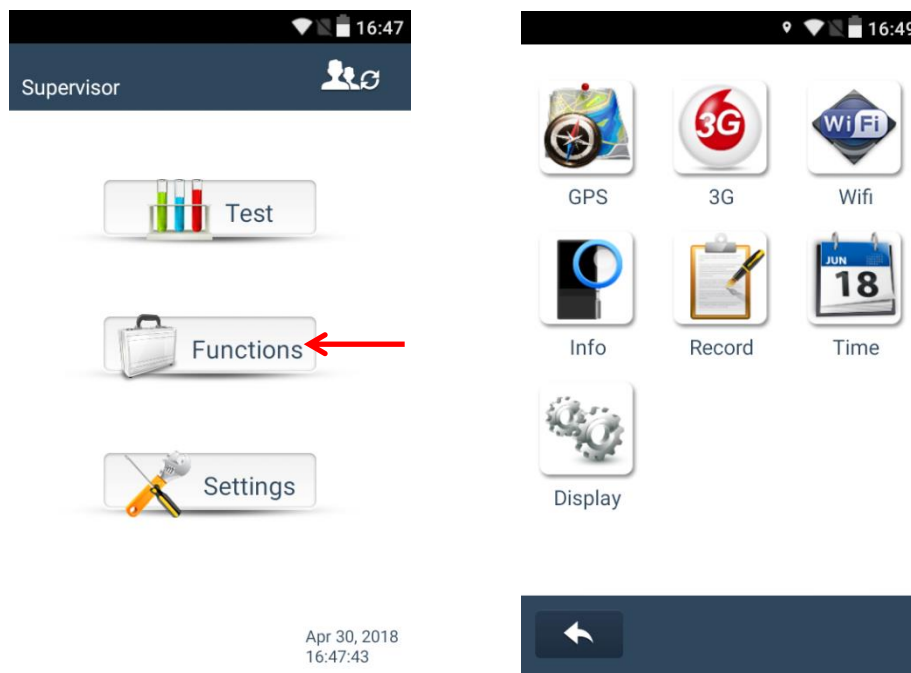

GPS

1. Se mostrará la Longitud y Latitud del dispositivo.
 2. La Longitud y Latitud de la prueba se almacena y se imprime en el recibo.
- NOTA:** El sistema de GPS solo funciona entre 5 a 10 minutos después de encender el dispositivo. Sólo puede recibir la señal en un área abierta. Si no hay señal del GPS la Longitud y Latitud no quedará registrada ni aparecerá en el recibo.



3G

Configuración de conexión 3G. La conexión 3G está deshabilitada para dispositivos sin el modulo 3G.



WIFI

Configuración de conexión Wifi



Info

1. Verifique la información del dispositivo.
2. Listado de tipos de casetes: el dispositivo solo puede leer los tipos de casetes de está lista. Contacte a su distribuidor de AquilaScan para agregar nuevos tipos de casetes según sea necesario.



Registro

1. Se pueden almacenar 100,000 registros de pruebas.
2. Seleccione el registro para ver la información de ese registro. Se pueden imprimir registros de prueba individuales.
3. Presione  para buscar los registros de pruebas por campo y presione  para confirmar



Hora

Configure hora y fecha del dispositivo.



Pantalla

Se puede ajustar el brillo de la pantalla y el tiempo para hibernar.

Configuraciones



Apr 30, 2018
16:47:43

Sólo personal autorizado con una clave puede ingresar al menu de configuración. Por favor refierase a las Instrucciones de Supervisor.

IMPRESORA

El dispositivo puede usar una impresora térmica incorporada al cuerpo opcional.

INSERTE PAPEL

Tome las manillas en ambos lados y tire para abrir la tapa de la impresora y luego insertar el papel. Cuando inserte un rollo de papel asegúrese que el lado brillante esté cerca de los dientes de corte.

NOTA: Si al imprimir no aparece nada, de Vuelta el papel para que la impresion salga por el otro lado del papel.

TAMAÑO ESTANDAR DEL PAPEL TERMICO

5.7cm X 560cm

Descarga de datos

1. Los registros de las pruebas pueden ser descargados a un PC para su análisis.
2. Instale el software de descarga, abra el software, conecte el dispositivo al PC con el cable USB, los datos se descargarán al PC.
3. Por favor refiérase a las Instrucciones del Software de Descarga para consultas adicionales referentes a la descargar los datos.

Carga de Batería

1. Conecte el cable de al Puerto de carga para cargar la batería.
2. El indicador de carga cambia de rojo a verde cuando la batería está completamente cargada.



www.aquilascan.com