



AlcoTorch V6

Manual de Usuario

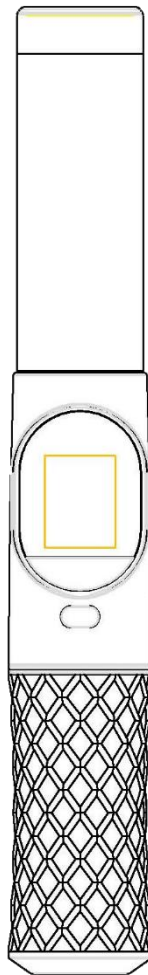


Este analizador de alcohol debe ser usado sólo para pruebas rápidas, sin contacto, para detección de Alcohol Etílico.
Cuenta con un poderosa linterna y bastón luminoso.


Estructura

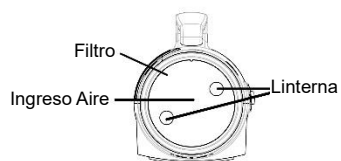

Vista Superior

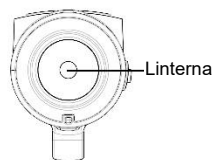

Vista Inferior

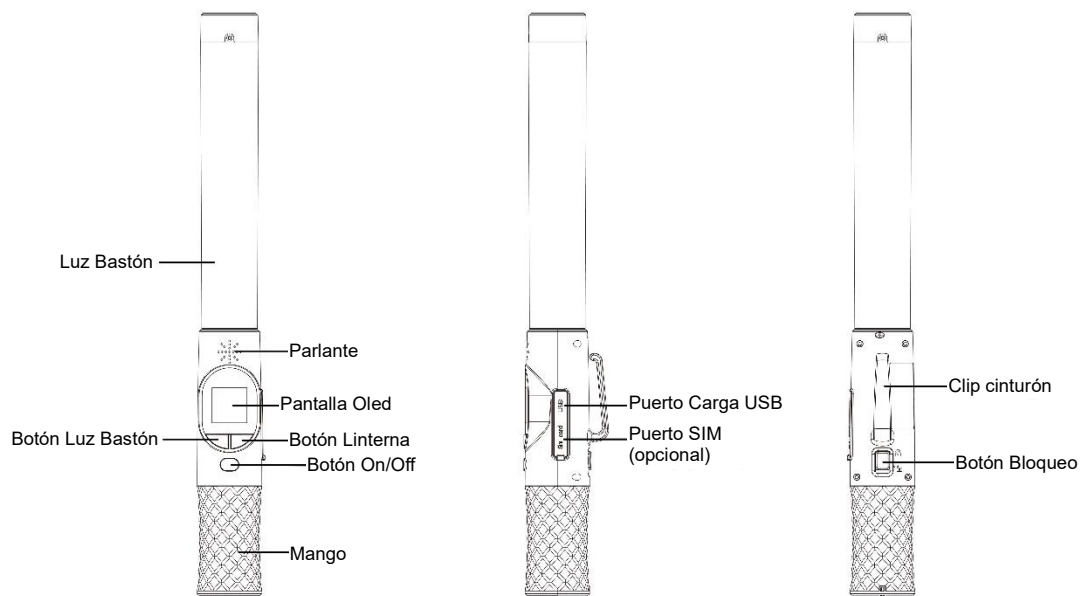

PROCEDIMIENTO

Análisis Alcohol

1. Presione y mantenga presionado el botón “ON/OFF” por 2 segundos para encender el dispositivo.
2. Pantalla muestra que el dispositivo está listo “Ready”.
3. Prueba automática: Posicione el dispositivo frente a la boca del sujeto y solicite que sople por 2 a 4 segundos. El dispositivo realizará un análisis de la muestra en forma automática, y el resultado se mostrará después del análisis.
4. Prueba Pasiva: Presione el botón “On/Off” para realizar una prueba pasiva. El dispositivo tomará muestras de aire en forma continua por unos segundos, mueva el dispositivo alrededor de la boca y nariz del sujeto durante la toma de muestra. El resultado se mostrará una vez terminada la toma de muestra.
5. Presione el botón “On/Off” para realizar otra prueba.
6. Cuando el dispositivo muestra en la pantalla “Ready”, presione y mantenga presionado el botón “On/Off Button” por 3 segundos para apagar el equipo. El equipo se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Luz de Bastón

Presione el botón linterna para activar la linterna. Para cambiar la frecuencia de funcionamiento de la linterna y apagarla presione en forma reiterada el botón.

Linterna

Presione el botón de linterna para cambiar encendido de linterna de la parte superior, inferior o apagado.

Menu

Cuando en dispositivo indique “Ready”, presione y mantenga presionado el botón “Luz Bastón” por 3 segundos para entrar al menú. Seleccione la opción utilizando los 3 botones.



1. Records: Muestra los registros, el dispositivo puede almacenar hasta 8000 registros.
2. Device Info: Para revisar el número de serie del dispositivo, versión de software y fecha de última calibración.
3. Calibration: Refiérase al manual de calibración. La calibración está protegida por una clave y solo puede ser realizada por un técnico calificado.
4. Setting: Refiérase al manual de ajustes. Los ajustes están protegidos por una clave y solo puede ser realizada por un técnico calificado

La fecha y hora actual se muestra en la parte inferior de la pantalla de menú.

Carga de dispositivo

Conecte el cable USB y cargue el dispositivo, se enciende una luz rojo mientras el dispositivo se carga. La luz roja se apaga cuando el dispositivo está cargado completamente. El tiempo de carga es entre 3 a 4 horas.